

MODELO	MIO-CARE	
VERSION	BEAUTY (35 PRG)	
INCLUYE		
• Electroterapia TENS /EMS/FES con con pantalla gráfica • 2 cables de electrodos con 4 conexiones (total 8 electrodos conectables) • electrodos adhesivos pregelados • batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnologia LL (long lasting) de baja autodescarga • cargador de la batería interna • pinza de enganche al cinturón • manual de uso e manual de colocación de los electrodos • bolsa de transporte		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:		
• Electroterapia combinada de 2 canales independientes; • generatore Generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre positivo y negativo es igual y constante, evitando el peligroso efecto polar posible si se estimula con una onda no compensada; • funcionamiento asíncronico de los canales de estimulación (lipólisis); • teclado digital con controles simples e intuitivos; • instrucciones del programa en curso o tiempo restante visible directamente en pantalla; • funcionamiento con bateria interior recargable (extraíble); • display retroiluminado; • intensidad máxima 200 mApp; • dispositivo médico certificado CE0476.		
¿FORMAS DE ONDA O NÚMERO DE PROGRAMAS?		
Muchos dispositivos en el mercado ofrecen aparentemente un gran número de programas, con un mínimo gasto. Es bueno aclarar que el número de programas no debe confundirse con los nombres o el número de tratamientos. Algunos se basan en la ignorancia de los consumidores y el intercambio de programas y tratamientos. El mismo programa TENS CONVENCIONAL, por ejemplo, se puede aplicar hasta en 50 partes del cuerpo, pero es siempre el mismo programa con el mismo propósito, 1 programa y 50 aplicaciones del programa. Los programas son diferentes cuando uno o más de las siguientes variables son diferentes Intesidad, frecuencia y duración de la estimulación. El TENS convencional trabaja por ejemplo entre 70 y 150 Hz, con una duración del impulso de 50/70 microsec por un tiempo de al menos 40 minutos. El TENS endorfnico trabajo entre 1 y 4 Hz, con una duración del impulso de 250/300 microsec por un tiempo de a menos de 20 minutos. Los objetivos son diferentes: en el primer caso, una reducción inmediata del dolor y no muy duradero en el segundo caso, una reducción del dolor y más duradero. Es sólo un ejemplo para aclarar que los electroestimuladores no son todos iguales: es crucial para el éxito de tratamiento, el uso de equipos bien programados (por profesionales) y que tengan, no un gran número de programas teóricos, pero si una serie de formas de onda adecuadas para la consecución de los objetivos. ¡ES EL PROPÓSITO DE SU MIO-CARE TENS!		
20 programas medicos		15 programas belleza
Tens convencional (rápido)		Fortalecimiento miembros superiores y tronco
Tens endorfnica (retrasada)		Fortalecimiento miembros inferiores
Tens con valores máximos		Tonificación miembros superiores y tronco
Antiinflamatorio		Tonificación miembros inferiores
Cervicalgia/cefalea miotensiva		Definición miembros superiores y tronco
Lumbalgia/ciatalgia		Definición miembros inferiores
Distorsiones/contusiones		Modelación
Vascularización		Microlifting
Relajante		Lipólisis abdomen

Hematomas		Lipólisis muslos
Prevención atrofia		Lipólisis glúteos y caderas
Atrofia		Lipólisis brazos
Dolores mano y muñeca		Elasticidad tejidos
Estimulación plantar		Capilarización
Epicondilitis		Pesadez de las piernas
Epitrocleitis		
Periartritis		
Microcorriente		
Incontinencia por esfuerzo		
Incontinencia por urgencia		
Dimensiones: 135 X 61 X 25 mm		